


Aalto –suihkualusta Pikku-Miinojen käytössä

Aalto – suihkualusta koostuu suihkutuolista ja kuljetusalustasta. Sen avulla lapsi voi suihkutella, istua löylyssä ja matkustaa pesutilasta altaan viereen (uima-altaaseen sillä ei voi mennä).

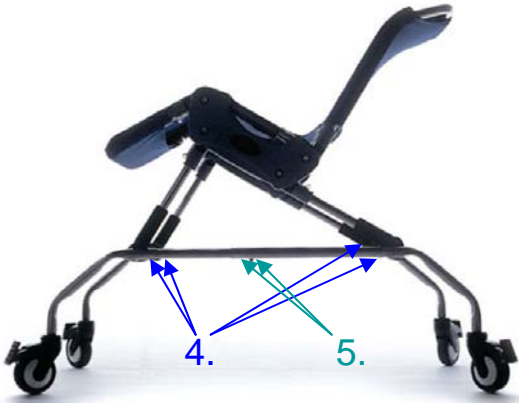

Säädöt:

1. Selkänojan kaltevuus (puserra ohuempaa metallitankoa paksumpaa vasten)
2. Jalkaosan kaltevuus (vedä "klipseistä")
3. Jalkojen kulma (vedä "klipseistä") – tällä voi säätää istuinosan kulmaa.

Tarkista, että osat tukevasti paikallaan.

Tuoliosan kiinnitys kuljetusalustaan:

4. Neljä (4) tarranauhaa
5. Kaksi (2) ruuvia

Tarkista, että ovat hyvin kiinni!

Suihkualustan käyttämisen säännöt

Jotta yhteisten apuvälineiden käyttäminen on kaikille mukavaa, tarvitsemme niiden käyttämiseen säännöt. Aloitetaan alla olevilla säännöillä ja kehitetään ne yhdessä sellaisiksi, että toimivat käytännössä.

1. Ilmoita ryhmän organisoijalle, että käytätte tätä apuvälinettä.
Anna palautetta sen toimivuudesta!
2. Yhteinen käyttö – huomioi muut!
 - Suihkualustoja on toistaiseksi vain yksi, täytyy siis sopia, miten se on käytössä. Mikä olisi toimiva systeemi?
3. Turvallisuus
 - Ennen ja jälkeen käytön tarkista, että suihkualustan säädöt tukevasti paikoillaan
 - Ole huolellinen turvavöiden kanssa (kolme tuki- tai turvavyötä)
 - Lasta ei saa jättää suihkualustalle ilman valvontaa.
4. Hygienia
 - Jokainen käyttäjä huolehtii puhdistuksesta käyttönsä jälkeen – jos tarvitset siihen apua, pyydä!
 - Huuhtelee runsaalla vedellä joka puolelta, myös kaikki turvavyöt!
 - Poista alustaan tarttuneet hiukset ym. (myös pyöristä!)
 - Jos sattuu pieni tai iso vahinko, pese pesuaineella (esim. astianpesuaine)
 - Käytäntö osoittaa, pitääkö tehdä vielä muuta
5. Pidä osat tallessa
 - Tarkista, että jälkeesi suihkualustan kaikki osat, erityisesti turvavyöt ovat tallessa (tuki- tai turvavyötä on 3 kappaletta).